

DOA Provtagningsinstruktion för råmjölk- och mjölk kvalitet (nötkreatur)

Laboratorieanalyser som ingår

- Råmjölk: Antikroppar (Brix-mätning) och hygien (odling av koliforma bakterier)
- Annan mjölk: Hygien (odling av koliforma bakterier)

Material som behövs (kan beställas från SVA/Lantbrukets djur; tfn 018-67 40 00)

- 1 Remiss för råmjölk- och mjölk kvalitet (nötkreatur)
- 5 sterila plaströr med skruvlock
- 1 frysklamp
- 1 bubbelplastpåse till frysklampen
- 1 stor provpåse (undantaget veterinärmedicinskt prov) adresserad till:
SVA/Lantbrukets djur, 751 89 Uppsala

Instruktion för provtagning (1 rör per provtagningstillfälle, max ett prov per dag om prov ska tas 5 dagar i följd. Ett alternativ till detta är att ta max 5 prov från olika ställen/behållare vid ett tillfälle.)

1. Placera frysklampen i frysen.
2. Märk ett plaströr (medföljer) med gårdens SE-nummer och provtagningsdag.
3. Provet tas precis innan råmjölken/mjölken ska utfodras till en kalv.
4. Vänd nappflaska eller dylikt med råmjölk eller kärl med representativt prov från annan mjölk några gånger. Ta loss locket från plaströret och håll snabbt över råmjölk/mjölk i röret så att röret blir minst halvfullt. Skruva på locket så snabbt som möjligt. Ha röret öppet så kort tid som möjligt och undvik att röra vid öppningen på röret och insidan på locket så att provet inte smutsas ned.
5. Utfodra kalven som vanligt.
6. Fyll i remissen.
7. Torka av röret på utsidan med papper om det behövs och lägg röret i frysen och remissen i den vadderade provpåsen (medföljer).
8. Lägg röret i frysen meddetsamma eller lägg det i kylskåp tills det kan läggas i frys (senast inom 6 timmar).
9. Upprepa ovan tills du har tagit och frusit in 5 prover. Max ett prov per dag (alt. från max 5 ställen vid ett tillfälle)!
10. Lägg i frysklampen i bubbelplastpåsen (medföljer). Linda in rören med hushållspapper eller liknande och placera rören intill frysklampen inuti bubbelplastpåsen. Klistra igen bubbelplastpåsen med tejp.
11. Lägg påsen med rören och remissen i den adresserade SVA-provpåsen (medföljer).
12. Posta provpåsen strax innan brevlådans tömning eller skicka med lantbrevbäraren eller lämna till postcenter innan stängning. Viktigt att proverna inte blir liggande i varm postlåda och att de går iväg samma dag.

13. Proverna får endast skickas måndag – onsdag så de inte blir liggande på posten över helgen.