

PAR Provtagningsinstruktion: träckprov kameldjur

TRÄCKPROV KAMELDJUR

Träckprov bör tas färskt och skickas till SVA, gärna samma dag. Träckprov kan förvaras i kylskåp (ej i frys) över ett veckoslut innan provet skickas till SVA.

Det rekommenderas att flera djur i flocken provtas vår och höst. Helst undersöks samtliga djur individuellt. Annars provtas utvalda djur, t ex yngre som oftare bär på fler parasiter än äldre. Om samlingsanalys önskas skickas individuella prov tillsammans med en remiss där det tydligt framgår vilka prov som ska analyseras som en samlingsanalys, max 3 individer per samlingsanalys. Då väger laboratoriet upp lika mycket material från de tre proven som ska ingå i analysen.

För undersökning av endast mag- och tarmparasiter samt lilla leverflundran behövs totalt cirka 4 matskedar träck. Om även odling för stor löpmagsmask eller analys för stor leverflundra önskas behövs ytterligare minst 3 matskedar. Träckprovet förpackas i dubbla plastpåsar som försluts ordentligt och märks med till exempel djurets namn. För att förebygga läckage läggs något absorberande material mellan påsarna. Prov läggs sedan i ett vadderat kuvert tillsammans med remiss.

Skicka försändelsen till SVA, Parasitologen, 75189 Uppsala

Läs gärna mer om prov skickas till SVA på <https://www.sva.se/vi-erbjuder/skicka-in-prover-och-djurkroppar/>