

PAR Provtagningsinstruktion: Trikinanalys

PROVTAGNING VILDSVIN

Prov tas från frambenets grövre muskulatur (fläsklägggen), mellangärdets (diafragmans) fäste mot ryggen i de köttiga delarna, eller från muskulaturen i tungans infästning. **Observera!** Inte själva tungan utan den bakre delen av tungroten. (Eftersom det är svårt att ta ett bra prov från tungan rekommenderar SVA prov från framben eller mellangärde i första hand.)

Mellan 25-50 gram färskt material krävs.

Finns inte dessa delar kvar kan muskulatur mellan revbenen eller tuggmuskeln användas. Då krävs dubbel mängd, 50-100 gram (vilket medför högre undersökningskostnad). Dubbel mängd gäller även kött som är/varit djupfruset (vilket också medför högre analyskostnad).

Ovan angivna mängder avser **rent kött** efter det att senor och fett rensats bort. Trikiner finns endast i skelettmuskulatur och bara i muskeltrådarna. Alltså inte i fett, senor, hjärta, tungans främre hårda del eller andra organ som till exempel njure.

Använd [Trikinremiss Vildsvin](#). Alternativt beställer du flerpäck av [förbetalda analys-kit vildsvin](#) (skriv ”trikin” i sökutan) eller beställer [provtagningsmaterial](#).

Från 1 juli 2021 kan privatperson beställa trikinanalyser utan kostnad för vildsvinskött som ska ätas inom det egna hushållet. Subventioneringen gäller vildsvin skjutna i Sverige så länge avsatta medel räcker. Då används [Remiss Subventionerad trikinanalys för privatpersoner](#).

FÖRPACKA PROVET RÄTT

Detta behöver du:

- Två fryspåsar
- Absorberande material, till exempel hushållspapper.
- Vadderat kuvert

Gör så här – trelagersprincipen:

1. Lägg köttbiten i en fryspåse och förslut påsen ordentligt
2. Vira in den förslutna påsen i absorberande material, till exempel hushållspapper.
Lägg sedan allt i den andra påsen och förslut den väl.
Eventuell märkning skrivs/sätts på den yttre påsen.
3. Lägg prov och remiss i ett vadderat kuvert.

SKICKA PROVET

Posta gärna provet i början av veckan. Prov kan förvaras i kylskåp i upp till 14 dagar innan det skickas.

Adress:

SVA
Parasitologen
751 89 Uppsala

Har du frågor är du välkommen att ringa till Parasitologen: 018-674360

PROVTAGNING ANDRA DJUR ÄN VILDSVIN

Tamgris

Prov tas i första hand från mellangärdets köttigaste del vid fästet mot ryggsidan (minst 10 gram), annars som vildsvin (minst 20 gram).

Använd [Trikinremiss Tamgris/Häst](#). Alternativt beställer du flerpack av [förbetalda analys-kit gris](#) (skriv ”trikin” i sökrutan) eller beställer [provtagningsmaterial](#).

Häst

Prov tas från tuggmuskel eller muskulaturen i tungans infästning. Observera! Inte själva tungan utan den bakre delen av tungroten. Mellan 25-50 gram krävs.

Finns inte dessa delar kvar kan prov tas från mellangärdets fäste mot ryggraden (diafragmapelaren). Då krävs mellan 50-100 gram (vilket medför högre analyskostnad).

Använd [Trikinremiss Tamgris/Häst](#). Du kan också beställa [provtagningsmaterial](#).

Björn

Prov tas från mellangärde, tuggmuskel eller muskulaturen i tungans infästning. Observera! Inte själva tungan utan den bakre delen av tungroten. Minst 50 gram krävs.

Finns inte dessa delar kvar kan dubbel mängd muskulatur tas mellan revbenen. Då krävs ca 100 gram (vilket medför högre analyskostnad).

Använd [Trikinremiss Björn](#). Du kan också beställa [provtagningsmaterial](#).

Övriga djurslag (zoodjur samt annat vilt än björn och vildsvin)

Prov tas från mellangärde (diafragmapelaren), muskulatur mellan revbenen eller tuggmuskel. Cirka 50 gram krävs. Från dessa djurslag analyseras en större provmängd (dubbelt så mycket material som från till exempel vildsvin).

Använd [Trikinremiss Vilt](#).

FÖRPACKA OCH SKICKA PROV

Enligt instruktion ovan.