

MIK Provtagningsinstruktion - IB-virus

Provtagningsinstruktion för test av förekomst av IB-virus hos kycklingar

Utrustning

- Sax eller skalpell
- Märkpenna
- Provburk med tätslutande skruvlock
- Absorberande material
- Vadderat kuvert
- Remissblankett

Provtagningsmaterial kan beställas på SVA:s [webbshop](#).

Djur och material

Proven tas på slaktade eller avlivade djur.

IB-virus finns under akutstadiet en kort tid i lufttrören men stannar kvar en längre tid efter infektionen i caecaltonsillerna som provtas för PCR-undersökning.

Provtagningsteknik

Caecaltonsillerna är belägna i de smala delarna av blindtarmen i närheten av blindtarmsförgreningarna där de mynnar i colon. Saxen på bilden pekar på området.



*Provtagning av blindtarm.
Foto: Faruk Otman/SVA*

Tarmpaketet tas ut och blindtarmarna friprepareras. Provet med blindtarmsförgreningen tas ut med sax eller skalpell. Snitten är markerade på bilden. Fem prov från den undersökta flocken tas ut och läggs tillsammans i en provburk med tätslutande skruvlock.

Transport av prover

Proverna kan skickas till laboratoriet per post.

Observera trelagersprincipen: Provburken ska läggas i en påse tillsammans med absorberande material, som därefter läggs i ett vadderat kuvert.

Glöm inte att märka proven och fylla i remissen!